

Labtub®



Вакуумні системи для забору крові



ПРОБІРКА БЕЗ НАПОВНЮВАЧА

Внутрішня стінка пробірки зі спеціальною обробкою робить її аналогічною стінці судин людини.

Гладка внутрішня поверхня знижує ризик гемолізу зразків.

Застосування унікального складу пластика усуває проблему приліпання крові до стінки пробірки.

Максимально гарантується збереження вихідного складу крові, що робить результат тесту більш точним.



ДЛЯ ОТРИМАННЯ НАЙКРАЩИХ РЕЗУЛЬТАТІВ РЕКОМЕНДУЄМО ЗАЧЕКАТИ 1 ГОДИНУ,
А ПОТІМ ЦЕНТРИФУГУВАТИ ПРОТЯГОМ 10 ХВИЛИН ПРИ 1100-1300G



ВИСОКОЯКІСНА ПРОБІРКА З АКТИВАТОРОМ ЗГОРТАННЯ

У 2012 році отримано патент на активатор згортання.

Унікальний склад запобігає приліпання крові до стінки пробірки.

Застосування спеціального активатора згортання забезпечує максимальний вихід сироватки високої якості.

Завдяки унікальній запатентованій технології вирішена проблема розбивання клітин і рецесивного гемолізу в процесі швидкого згортання.

Високоякісний активатор згортання скорочує час повного згортання до 10 хв, кров згортається повністю, при цьому фібринові нитки з'являються рідко.



ДЛЯ ОТРИМАННЯ НАЙКРАЩИХ РЕЗУЛЬТАТІВ РЕКОМЕНДУЄМО ПЕРЕВЕРНУТИ ПРОБІРКУ 8 РАЗІВ,
ЗАЧЕКАТИ 20 ХВИЛИН, А ПОТІМ ЦЕНТРИФУГУВАТИ ПРОТЯГОМ 10 ХВИЛИН ПРИ 1100-1300G



ВИСОКОЯКІСНА ПРОБІРКА З РОЗДІЛЮЮЧИМ ГЕЛЕМ

У 2012 році отримано патент на розділюючий гель.

Технологія термостабільності забезпечує якість сироватки, зберігання при низькій температурі і можливість заморозки зразка.

Інертний високоякісний розділюючий гель не створює фізичних або хімічних перешкод у звичайних експериментах.

Висока стабільність, відсутність «крапель олії» після зберігання і центрифугування.

Унікальна запатентована технологія дозволяє уникнути виділення малих молекул на поверхню сироватки, забруднення зразків або блокування голки.



ДЛЯ ОТРИМАННЯ НАЙКРАЩИХ РЕЗУЛЬТАТІВ РЕКОМЕНДУЄМО ПЕРЕВЕРНУТИ ПРОБІРКУ 8 РАЗІВ,
ПОЧЕКАТИ 20 ХВИЛИН, А ПОТІМ ЦЕНТРИФУГУВАТИ ПРОТЯГОМ 5-10 ХВИЛИН ПРИ 1300-2000G



ПРОБІРКА З ЛІТІЙ - ГЕПАРИНОМ

ПРОБІРКА З НАТРІЙ - ГЕПАРИНОМ

Сучасна технологія мікророзпилення забезпечує швидку дію антикоагуляції гепарину на зразки крові, що дозволяє швидко отримати високоякісні зразки плазми.

Первісна пробірка може бути протестована на обладнанні і зберігатися, це допомагає лабораторії заощадити витрати, скоротити час обробки і поліпшити якість всього робочого процесу.



ДЛЯ ОТРИМАННЯ НАЙКРАЩИХ РЕЗУЛЬТАТІВ РЕКОМЕНДУЄМО ПЕРЕВЕРНУТИ ПРОБІРКУ
8 РАЗІВ, А ПОТІМ ЦЕНТРИФУГУВАТИ ПРОТЯГОМ 15 ХВИЛИН ПРИ 2000-3000G





ПРОБІРКА З ЦИТРАТОМ НАТРІЮ 3,2% АБО 3,8% З ПОДВІЙНОЮ СТІНКОЮ ДЛЯ ОБСТЕЖЕННЯ КОАГУЛЯЦІЇ КРОВІ

Матеріал внутрішньої стінки пробірки - поліпропілен, матеріал зовнішньої пробірки - ПЕТ, подвійний бар'єр знижує проникність води та повітря пластикової пробірки, забезпечує точність тесту коагуляції крові.

Унікальна стрес-мембранна обробка для внутрішньої стінки уникає коагуляційного механізму від активації через матеріал пробірки.

Використання патентованої технології унеможливорює активацію факторів згортання крові та тромбоцитів, забезпечує умови для точного результату та незмінності протромбінового часу і часу АЧТВ.



ДЛЯ ОТРИМАННЯ НАЙКРАЩИХ РЕЗУЛЬТАТІВ РЕКОМЕНДУЄМО ПЕРЕВЕРНУТИ ПРОБІРКУ 8 РАЗІВ,
А ПОТІМ ЦЕНТРИФУГУВАТИ ПРОТЯГОМ 5-10 ХВИЛИН ПРИ 2200G



ПРОБІРКА З K2/K3 EDTA

Особливості: унікальний процес швидкого розпилення наповнювача забезпечує відмінне перемішування наповнювача з пробією крові.

Передова технологія виробництва світового рівня довгостроково та ефективно підтримує склад та кількість наповнювача протягом усього терміну придатності.

Унікальна біонічна обробка внутрішніх стінок дозволяє ефективно підтримувати стабільність активності тромбоцитів.

Спеціальна обробка стінок пробірок робить їх дуже гладкими і повністю усуває вплив заряду.

Суворі технології контролю виключає вплив забруднення мікрочастинками на результат випробувань.

Найновітніша технологія анти-мікрокоагуляції та анти-мікроаглютинації.



ПРОБІРКА ДЛЯ ВИМІРЮВАННЯ ГЛЮКОЗИ В ПЛАЗМІ

Комплексна антикоагуляційна система уникає ризик зовнішньої коагуляції та гемолізації. Унікальний склад наповнювача значно зменшує гліколіз еритроцитів.

Найновітні технології забезпечують стабільність зразків крові з глюкозою тривалий час.

Клінічні випробування показали, що глюкоза в крові є стабільною протягом 5 днів при зберіганні зразків при 2-8 °C.



ДЛЯ ОТРИМАННЯ НАЙКРАЩИХ РЕЗУЛЬТАТІВ РЕКОМЕНДУЄМО ПЕРЕВЕРНУТИ ПРОБІРКУ 8 РАЗІВ,
А ПОТІМ ЦЕНТРИФУГУВАТИ ПРОТЯГОМ 5-10 ХВИЛИН ПРИ 1000-1200G



ПРОБІРКА ДЛЯ ШОЕ

0,129 моль / л Натрій-Цитратна буферна система для антикоагуляції зразків крові.

Повністю закрита пробірка для ШОЕ може бути використана безпосередньо на динамічному аналізаторі ШОЕ більш зручно і безпечно.

Спеціальна обробка ефективно уникає викіпання наповнювача, а також підтримує рівень вакууму.



ПРОБІРКА З РОЗДІЛЬНИМ ГЕЛЕМ К2-ЕДТА

Виробництво в повністю очищених умовах мінімізує можливий вплив забруднень на результат випробувань.

Внутрішня стінка обробляється діетилрікарбонатом (DEPC), готові продукти стерилізуються Собо, рівень стерильності: 10^{-6} , повністю усуває вплив ферменту РНК на тест.

Використання унікальної технології наповнювача не впливає на активність ферменту Таq, що використовується при тестуванні нуклеїнової кислоти, і ефективно усуває інтерференцію гемоглобіну в еритроцитах на результат випробування.

Мікропробірки для забору капілярної крові

Матеріал: пластик. Строк придатності: 2 роки. Об'єм: 0.1-0.5 мл. Розмір: 8x45 мм.



Без наповнювача



З активатором згортання



З активатором згортання і розділюючим гелем



K2/K3 - EDTA



Na - Гепарин



Li - Гепарин



EDTA та Na Флуорид



Management
System
ISO 9001:2008
EN ISO 13485:2012
www.tuv.com
ID 9105018073



ЕКСКЛЮЗИВНИЙ ДИСТРИБ'ЮТОР В УКРАЇНІ:

XiMeK

тел.: (044) 248-64-84
факс: (044) 249-40-80
моб.: (067) 500-63-09
office@himek.com.ua
www.himek.com.ua